

Bruno

SERUM FİZYOLOJİK

TEK DOZLUK FLAKON

STERİL BURUN / GÖZ SOLÜSYONU

65NOT2012/C
65NOP2012/C

 **ABDİBRAHİM**

BİRİM FORMÜL

Her 100 ml çözelti, etkin madde olarak 0.9 gram sodyum klorür ve yardımcı madde olarak saf su içerir.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ

Serum fizyolojik solüsyonu; bebeklerin, çocukların veya yetişkinlerin burun ve gözlerinin günlük temizliği ve bakımı için önerilmektedir.

Burun temizliği: Serum fizyolojik solüsyonu, bebeklerin genellikle mukusla tıkalı olan burunlarının yıkanmasını kolaylaştırır, salgılardan kurtulmalarına yardımcı olur. Ayrıca, nemlendirici etkisinin yardımıyla özellikle yetişkinlerin burun kuruluğu yakınmasını hızlı bir şekilde giderir.

Göz Temizliği: Serum fizyolojik solüsyonu gerek bebeklerin, gerekse de yetişkinlerin göz temizliği için kullanılabilir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Bilinen bir yan etkisi yoktur.

Sadece tek kullanımlıktır.

Koruyucu madde içermediklerinden, tek dozluk flakonlar açılıp kullanıldıktan sonra kalan miktar yeniden buruna ya da göze uygulanmalıdır.

Aynı flakon hem burun hem de göz temizliği ve bakımı için kullanılmamalıdır. Enjeksiyon yolu ile kullanılmaz.

Serum fizyolojik solüsyonu, herhangi bir tehlikeye neden olmaksızın, gereken sıklıkla ve uzun süreli olarak kullanılabilir.

Eğer burun veya göz için bir ilaç kullanılıyorsa, serum fizyolojik solüsyonu mutlaka bu ilacın kullanımından önce buruna ya da göze uygulanmalıdır.

Bu ürünü kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz.

Kullanmakta olduğunuz herhangi bir ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Bilinen bir yan etkisi mevcut değildir.

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı, Türk Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Buruna uygulama:

Baş hafifçe eğik olacak şekilde burun deliğinin içine, flakon hafifçe bastırılarak uygulanır.

Uygulama sonrasında bebeğin burnu nazikçe sümkürtülmeli, erişkinler de kendi burunlarını temizlemelidirler.

Bebeklerde orta kulakta kontaminasyon riskini önlemek için flakon çok az bir basınçla uygulanmalıdır.



Flakonun üst kısmını döndürüp kopartarak açınız.





65NOT2012/C
65NOP2012/C



Uygulanması gereken miktar için, flakona yavaşça basınız.



Bebeğinizi yatırınız ya da başını hafifçe arkaya eğiniz. Açmış olduğunuz flakonu hafifçe bastırarak, burun deliğinin içerisine uygulayınız. Aynı uygulamayı diğer burun deliğine de yapınız.



Solüsyonun bebeğinizin burnunda etkili olması için bir süre bekleyiniz, daha sonra başını kaldırarak fazla solüsyonu siliniz. Süt çocuklarında kullanırken, orta kulak kontaminasyonlarından sakınmak için, flakona daha yavaşça basınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız.

Son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.

CE İşareti Sertifika Tarihi: 25/08/2000

Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi: Kasım, 2012

STERILE A



CE 0459

Gözde uygulama:

Bir parça pamuk flakonla ıslatılarak bebeğin göz kapakları nazikçe silinir veya göze flakondan birkaç damla damlatılarak, steril bir kompres yardımıyla bebeğin göz kenarları temizlenir.

Yetişkinlerde bu ürün doğrudan göze damlatılarak yıkama ya da göz banyosu şeklinde kullanılabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

5 ml'lik tek dozluk flakonlarda.

İTHALATÇI VE DAĞITICI

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Maslak / İstanbul

ÜRETİCİ İSİM VE ADRESİ

Laboratoire UNITHER
Espace Industriel Nord
151 Rue André Durouchez
CS 28028, 80084 Amiens Cedex 2
FRANCE / FRANSA