

ABDİİBRAHİM

## BRUNO baby Nazal Aspiratör

### KULLANIM KILAVUZU

Bruno Baby Nazal Aspiratörü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bruno Baby Nazal Aspiratör bebeğinizin burnunun kolay, güvenilir ve etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar.

### 1. BRUNO BABY NAZAL ASPİRATÖR NEDİR?

Bebeklerin burun boşlukları dar olmasından dolayı tıkanması kolaydır, ayrıca sümkürme

hareketi de yapamazlar. Bu nedenle burunlarının temiz ve açık tutulmasında günlük burun temizliği son derece önemlidir.

Nazal aspirasyon, bebeğinizin burun tıkanıklığında, özellikle bebeğinizi beslemeden önce gereken sıklıkta önerilmektedir.

Bruno Baby Nazal Aspiratör kolay, güvenli ve hijyenik kullanımı sayesinde, bebeğinizin normal şekilde nefes almasına, yemek yemesine ve uyumasına yardımcı olur; kendisini daha iyi hissetmesini sağlar.

Burun salgılarının burundan uzaklaştırılması kulak enfeksiyonları (otitis), sinüs enfeksiyonları (sinüzit) ya da öksürük gibi komplikasyonların da önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Bruno Baby Nazal Aspiratör hijyen sağlayan absorban bir filtre içermektedir. Ergonomiktir ve ekstra yumuşak başlıkları sayesinde daha iyi kullanım sağlar.

Bruno Baby Nazal Aspiratör yumuşak başlıkları, mükemmel ve güvenli tasarımı sayesinde bebeğinizin burnunu nazikçe temizler.

Bruno Baby Nazal Aspiratör 2 adet tek kullanımlık yumuşak başlık içermektedir ve bebeğinizin burnuna mükemmel uyum sağlar.

Tek kullanımlık yedek başlıklar 10'lu ambalajlar halinde de mevcuttur. Bruno Baby Nazal Aspiratörün bileşeni olan başlıklar, ağızlık ve hortum BPA içermemektedir.

Bruno Baby Nazal Aspiratörü, bir serum fizyolojik ya da deniz suyu çözeltisinden (Bruno Baby Serum Fizyolojik Tek Dozluk Flakon) sonra kullanabilirsiniz.

Bu çözeltiler, burun salgılarının çocuğunuzun burnundan uzaklaştırılmasını kolaylaştıracak ve burnunu açacaktır.

Yenidoğan bebekler, küçük çocuklar ve çocuklar için uygundur. Bununla birlikte, yenidoğanlarda medikal gözetim altında kullanılmalıdır.


Bruno Baby Nazal Aspiratör ve yedek başlık bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık (alerji) durumunda kullanmayınız.

Hijyenik nedenlerle, kontaminasyonu engellemek

amacıyla, aspiratör başlıkları tek kullanımlıktır. Kullanımdan sonra değiştirilebilir başlığı atınız.

Bu ürünle ilgili sorularınız varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

### 2. BRUNO BABY NAZAL ASPİRATÖR KULLANIM ŞEKLİ

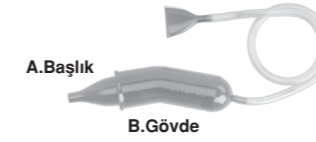

- Tek kullanımlık değiştirilebilir ucu **A**, aspiratörün gövde kısmına **B** yerleştiriniz.
- Bebeğinizi sırt üstü yatırınız.



- Ağızlığı ağızınıza yerleştirin ve aspiratörün ucunu (A) bebeğinizin burun deliğine yerleştiriniz.

- Ağızlık kısmını kullanarak yavaş ve düzenli bir şekilde içinize çekiniz (aspirasyon).

- Aynı işlemi iki burun deliği için de uygulayınız.

- Eğer aspiratör ucu (A) dolarsa, ağızlık yoluyla hava üfleyerek salgıları emme başlığından bir mendil yardımıyla boşaltınız ya da ucu değiştiriniz.
- Kullanımdan sonra değiştirilebilir ucu (A) çıkarınız ve atınız.

### 3. BRUNO BABY NAZAL ASPİRATÖR SAKLAMA KOŞULLARI

Bruno Baby Nazal Aspiratör'ü çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Sıcaktan koruyunuz.

Etiketini veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Bruno Baby Nazal Aspiratör'ü ve Yedek Başlıkları kullanmayınız. Kırılmış ya da hasarlı ürünü kullanmayınız.

### 4. DİĞER BİLGİLER

Bileşimi  
Yedek uçlar ve hortum - PVC  
Diğer malzemeler - PP  
**İçerik**  
1 nazal aspiratör ve 2 adet tek kullanımlık yumuşak yedek başlık

orijinal ambalajında  
Tek kullanımlık yumuşak yedek başlıklar 10'lu tek kullanımlık yedek başlık kutularında

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere  
Cad. No:4 34467  
Maslak/Sarıyer/İstanbul

Yayın tarihi: Aralık 2017  
Revizyon tarihi: Aralık 2021



A20013975/01

## Bruna Baby Nazal Aspirator

ABDİİBRAHİM



Date:  
**20.12.2021**

Others: .....

Item Code:  
**A20013975/01**

Revision No:  
**00**

Dimensions:  
**240 x 100 mm**

Min. Font Size:  
**8 pt**

Die Cut No.:  
**N/A**

Pharmacode No.:  
**XXXXX**



Pharmacode Specs.  
(h: 8 mm)  
Thick Bar : 1.5 mm  
Thin Bar : 0.5 mm  
Line Spacing : 1.0 mm

Barcode No:  
**N/A**

Country:  
**Türkiye**

Carton Quality:  
**45 g/m<sup>2</sup> Katlı**

Pre-folded  
(Once)

Pre-folded  
(More than once)

Perforating

COLORS

Pan. Black C

DIRECTION OF GRAIN

Uzun kenara paralel olmalıdır